

OCUhyl C[®]

oční kapky, roztok

Tento výrobek je zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uchovejte si tyto písemné informace. Možná si je budete muset znovu přečíst.

Popis přípravku

Oční kapky OCUhyl C bez konzervačních látek obsahují jako hlavní složky hyaluronát sodný a extrakt z měsíčku lékařského. Oční roztok je plněn do vícedávkové lahvičky uzavřené speciálním uzávěrem Novelia. Lahvička je označena štítkem a balena v papírové krabičce spolu s návodem k použití. 1 ml roztoku obsahuje 30 kapek.

Hydratační, zklidňující a zvlhčující účinek na oči

Kyselina hyaluronová je látka, která se přirozeně vyskytuje v oku a dalších částech těla, proto tyto oční kapky poskytují účinnou úlevu a dlouhodobý komfort od pocitu suchosti a pálení nebo únavy očí. Extrakt z měsíčku lékařského má ochranný, protizánětlivý a regenerační účinek na epitel oka.

Složení roztoku:

Hlavní složka: hyaluronát sodný 1,2 mg na 1 ml.

Pomocné látky: extrakt z měsíčku lékařského, chlorid sodný, chlorid draselný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu hořečnatého, trihydrát octanu sodného, citrát sodný, čištěná voda.

Pomocné látky se známým účinkem:

Extrakt z měsíčku lékařského (Calendula officinalis) 1,0 mg v 1 ml (0,1 %).

Nositelé kontaktních čoček:

OCUhyl C neobsahuje konzervační látky, takže je vhodný pro nositele kontaktních čoček a pro osoby s citlivými očima.

Určené použití

OCUhyl C oční kapky jsou určeny k hydrataci očí, k vytvoření dočasného ochranného filmu na rohovce oka při nedostatečné tvorbě slz, ke zlepšení stability a kvality slzného filmu, čímž hydratují a chrání povrch oka zvláště při stavech spojených se syndromem suchého oka.

Indikace

OCUhyl C oční kapky jsou určeny pro uživatele s mírnou, středně těžkou a těžkou formou syndromu suchého oka různých etiologií:

- keratokonjunktivitida sicca,
- Sjörgenův syndrom,
- Meibomová blefaritida,
- syndrom suchého oka v důsledku stárnutí/hormonálních změn, jako je menopauza,
- syndrom suchého oka po operaci,
- cizí těleso v oku, únava a pálení
- příznaky syndromu suchého oka v důsledku faktorů prostředí a dalších faktorů, jako je znečištění ovzduší, používání počítače, klimatizace, kontaktní čočky, užívání léků

Cílová populace a uživatelé

Oční kapky OCUhyl C mohou používat dospělí, dospívající a děti.

Omezení použití

Nevhodné pro děti mladší 2 let.


Dávkování

Obvykle se do oka aplikuje 1 kapka 1 až 3krát denně, lze aplikovat i častěji.

Pokyny před aplikací

Po otevření jsou oční kapky OCUhyl C připraveny k vkápnutí do oka.


1. Umyjte si ruce a pohodlně se posaďte nebo postavte.
2. Odšroubujte víčko lahvičky.

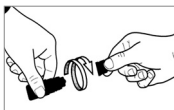

3. Držte lahvičku mezi palcem a ostatními prsty směrem dolů.
4. Před první aplikací se doporučuje ukápnout první kapku z oka jemným stlačením lahvičky, protože při silném a nerovnoměrném stlačení lahvičky může dojít k vystřikování většího objemu roztoku.
5. Prstem jemně stáhněte spodní víčko postiženého oka dolů.



6. Umístěte hrot kapátka blízko oka, ale tak, aby se nedotýkal oka ani přilehlých oblastí oka.
7. Jemně stiskněte lahvičku tak, aby se do oka dostala pouze 1–2 kapky, nebo více kapek v případě nutnosti vypláchnutí. Poté uvolněte spodní víčko a pomalu zavřete oko, aby se roztok očních kapek OCUhyl C rovnoměrně rozprostřel po povrchu oka. Před dalším vkápnutím nechte vzduch do plastové lahvičky nasát, aby se vrátila do původního stavu, a poté pokračujte v aplikaci do oka podle doporučení. Upozorňujeme, že mezi stisknutím a vytékáním kapky může uplynout několik sekund. Lahvičku nesmíte stisknout příliš silně.

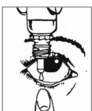

8. V případě potřeby postup opakujte pro druhé oko.



9. Po použití je třeba lahvičku jednou protřepat směrem dolů, aniž byste se dotkli hrotu kapátka, aby se odstranila veškerá zbytková tekutina na hrotu. To je nezbytné k zajištění sterility očních kapek a snazší aplikaci další kapky při následné aplikaci.

10. Ihned po aplikaci pevně uzavřete víčko lahvičky.

Kontraindikace

Oční kapky OCUhyl C se nesmí používat v případě precitlivělosti (alergie) na kteroukoli složku přípravku. Děti mladší 2 let.



Varování

- Informujte svého lékaře nebo lékárnika, pokud jste alergičtí na některou složku přípravku. Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, kontaktujte svého lékaře.
- Nepoužívejte tento přípravek, pokud si před prvním otevřením lahvičky všimnete, že je bezpečnostní kroužek šroubovacího uzávěru poškozený nebo je obal poškozen.
- Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, a to ani v případě, že je lahvička stále uzavřená. Datum expirace je uvedeno na štítku nebo krabičce vedle ikony přesýpacích hodin a vztahuje se k poslednímu dni v měsíci. Po otevření lahvičky lze přípravek používat pouze po dobu 3 měsíců.
- Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
- Při aplikaci přípravku se kapátko nesmí dotýkat oka ani očního víčka. Po aplikaci musí být uzávěr pevně zašroubován, aby se zabránilo možné kontaminaci.



Upozornění

Současné používání jiných očních přípravků

Pokud používáte i jiné oční kapky nebo masti, vyčkejte alespoň 5 minut mezi jednotlivými aplikacemi. Oční mast aplikujte jako poslední.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Krátce po vkápnutí přípravku do oka se může dočasně objevit rozmazané vidění. Proto neřídte motorová vozidla ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, dokud se vaše zraková schopnost nevrátí k normálu.

Pokud se nepříjemné pocity, kvůli kterým byl přípravek aplikován, nezlepší a přetrvávají, nebo se dokonce zhoršují, navštivte svého očního lékaře.

Aby se snížilo riziko křížové kontaminace a přenosu infekce, měla by obsah jedné lahvičky používat pouze jedna osoba.

Nežádoucí účinky

Oční kapky OCUhyl C jsou velmi dobře snášeny. Vzácně se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

- Alergická reakce, která se může projevit jako zarudnutí, svědění a otok očí
- Lokální podráždění (svědění, pocit cizího tělesa nebo mírné pálení)
- Bolest oka
- Překrvení spojivek
- Dočasně rozmazané vidění

Interakce Zatím nejsou známy.

Klinický přínos

Oční kapky OCUhyl C podávané do oka pomáhají zmírnit příznaky suchosti a očního diskomfortu a zlepšit zdraví a hojení očního povrchu.

Pokyny k uchovávání a likvidaci

Uchovávejte při pokojové teplotě 10–25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužitý přípravek vraťte do lékárny. Čistý obalový materiál zlikvidujte zodpovědně v souladu s místními pokyny v příslušné nádobě na tříděný odpad.

Obsah balení

Polyethylenová (LDPE) lahvička s kapátkem Novelia, závitový polyethylenový uzávěr s bezpečnostním kroužkem, etiketa. Plastová lahvička je balena v kartonové krabičce.

Velikost balení: 1 x 10 ml

Výrobce:



UNIMED PHARMA spol. s r.o.
Oriešková 11, 821 05 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk
www.unimedpharma.eu

Význam piktogramů na obalu

	Výrobce		Číslo šarže
	Datum výroby		Použitelné do
	Teplotní omezení		Přečtete si návod k použití
	Zdravotnický prostředek		Nepoužívejte, pokud je obal poškozen, a řiďte se pokyny k použití
	Sterilizováno aseptickými technikami		Uchovávejte v suchu
	Uchovávejte mimo dosah slunečního záření		Upozornění
	Počet kapek v 1 ml		Jedinečný identifikátor přípravku

Datum poslední revize textu: březen 2025